

HandEyeHOME laitteen ohjelmiston päivittäminen

HandEyeHOME tuotteisiin julkaistaan ajoittain ohjelmistopäivityksiä. Tämä ohje kuvaa, miten asennat ohjelmistopäivityksen




1. Avaa sovelluksessa Minun laitteeni -näkömää ja tarkista, että päivitettävä laite on yhteydellä päivitystä varten

2. Tarkista myös, että akku on ladattu päivitystä varten

3. Klikkaa laitteen "Asetukset"-painiketta

4. Klikkaa "Päivitä laite" painiketta. Se on näkyvillä, jos laitteelle on ohjelmistopäivitys

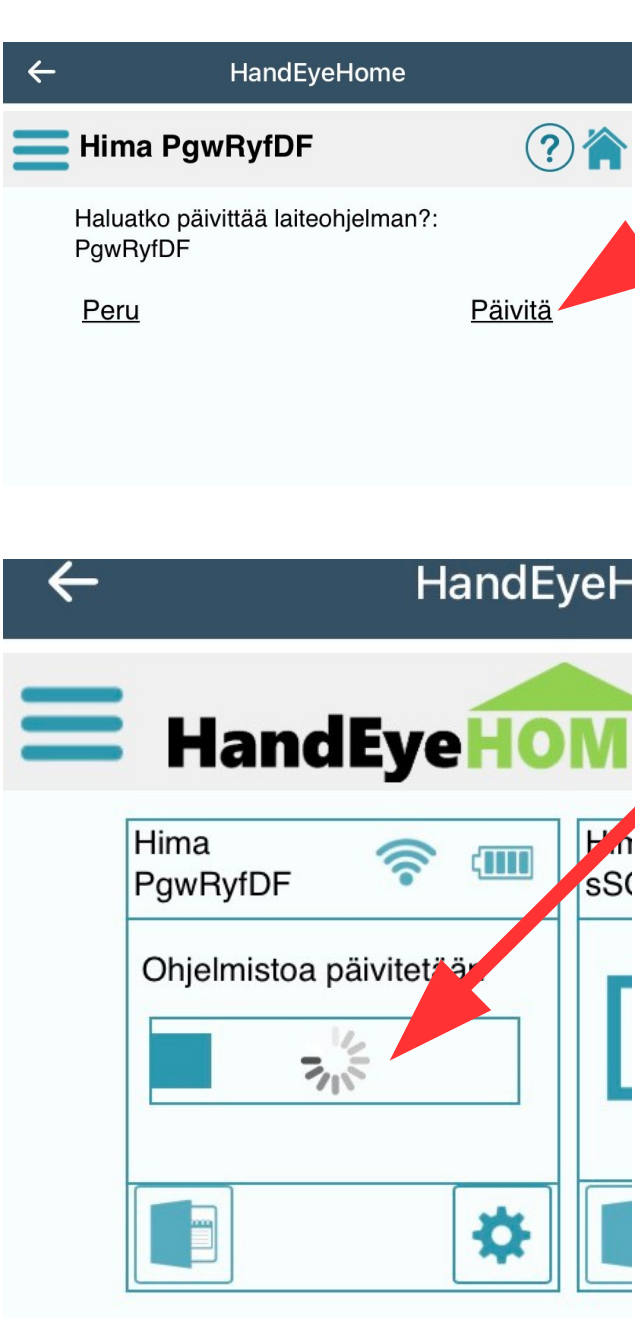

5. Vastaa varmistuskysymykseen ”Päivitä”, jos haluat tehdä päivityksen.

6. Odota että päivityspalkki etenee loppuun asti ja palkissa näkyy hetken teksti ”Päivitys onnistui”. Päivitys kestää joitakin minutteja.

Huom.: Jos palkkiin ilmestyy teksti ”Päivitys epäonnistui”, niin sammuta laite, laita siihen sähköt uudelleen päälle ja kokeile päivitystä uudestaan.

Päivityksen jälkeen voit varmistaa, että päivitys onnistui avaamalla laitteen asetusnäkyvän (askel 3 ja 4 tässä ohjeessa). Jos ”Päivitä laite” painiketta ei näy, niin laitteessa on viimeisin ohjelmistoversio.